



Move



HANDLEIDING MOVE VIGOROUS



Gefeliciteerd ,

met uw nieuwe aankoop. U heeft gekozen voor de Move Vigorous, de elektrische trike voor zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Een coole uitstraling, sterke motor en een makkelijke bediening zijn slechts enkele kenmerken van uw Move Vigorous. Maar het belangrijkste kenmerk blijft toch: door zijn elektrische motor is de Move Vigorous milieuvriendelijk.

Stil, sterk, wendbaar, lage gebruikskosten, lage onderhoudskosten, makkelijke bediening, maar vooral GROEN.

Dit maakt de Move Vigorous het ideale vervoermiddel voor u.



Stille motor (borstelloos)
Actieradius 60 tot 70 kilometer



Schijfremmen

3 jaar frame garantie



Rolkooi



Plaats voor twee personen
In verschillende kleuren leverbaar

Verwarming
Ledverlichting

Technische gegevens



	Move Vigorous S-Line II	Move Vigorous InnerCity II
Categorie:	L2e	Scootmobiel
Aantal deuren:	2	2
Aantal zitplaatsen:	2 (1 voor, 1 achter)	2 (1 voor, 1 achter)
Banden:	As 1 = 130 / 60-13, As 2 = 135 / 70 R12	As 1 = 130 / 60-13, As 2 = 135 / 70 R12
Afmetingen (LxBxH):	2.260 x 1.160 x 1.510 mm	2.260 x 1.090 x 1.510 mm
Wielbasis:	1.700 mm	1.700 mm
Gewicht (rijklaar):	320 kg	315 kg
Neto max. vermogen:	1,5 kW	1,5 kW
Versnelling:	3 versnellingen naar wens instelbaar	3 versnellingen naar wens instelbaar
Giering verhoudingen:	1: 10.27	1: 10.27
Max. snelheid:	45 km/h	45 km/h
Geluidsniveau:	97 / 24 dB	97 / 24 dB
Actieradius:	60 km	80 km
EG-typegoedkeuring:	e13*168/2013*01108*00	e13*168/2013*01108*00
Datum goedkeuring:	21-05-2021	21-05-2021

Waarschuwing

- De Move Vigorous beschikt over maximaal 2 zitplaatsen.
- Maximaal laadgewicht 150 KG.
- Rijden en drank gaan niet samen.
- Ga niet rijden als u vermoeid bent.
- Niet bellen tijdens het rijden.
- Houdt u aan de algemeen geldende verkeersregels.

Enkele tips voor u gaat rijden:

- Zorg dat de spiegels in de voor u juiste stand staan.
- Zet de stoel in een comfortabele stand.
- Controleer of de batterijen gevuld zijn.
- Rij rustig weg.
- Zorg dat de Move Vigorous niet te water raakt.



Kenmerken voorzijde:

1. Volledig geveerde voorvork.
2. Groot voorruit voor duidelijk zicht.
3. Koplamp.
4. Knipperlichten voorzijde.
5. Ruitenwisser.
6. Lichtmetalen velgen. (zowel voor als achter)
7. 2 grote zijspiegels.
8. Schijfremmen. (zowel voor als achter)
9. Makkelijke instap aan beide kanten door ver openslaande portieren.

9 7 1 8 6



Kenmerken achterzijde:

1. Achterlichten.
2. Achteruitrijverlichting.
3. Knipperlichten.
4. Laadpunt.
5. Motor.



1

Starten van het voertuig.

Zorg dat de blauwe hoofdschakelaar achterop in het oplaadklepje (zie pagina 14 “laden van de accu’s”) naar rechts staat. Deze dient ook naar rechts te staan tijdens het laden van het voertuig.

Zorg dat de rode hoofdschakelaar op het rechterhandvat naar beneden staat. (zie pagina 12 “bediening”)

Om de Move Vigorous te starten maakt u gebruik van de contactsleutel. Draai de sleutel naar rechts: u heeft het contact aangezet en het voertuig gestart.

Zorg dat alle handremmen los zijn en druk de handrem op de vloer extra goed naar beneden.

Zet de D – N –R knop (zie pagina 11 “schakelaars”) in de gewenste stand. Kies uw gewenste versnelling (zie pagina 12 “bediening”)

U kunt nu wegrijden.

Als u nu de sleutel weer naar links draait heeft u het contact uitgezet. U kunt nu niet verder rijden.

Stuurslot.

U kunt uw Move Vigorous extra beveiligen door gebruik te maken van het stuurslot. U dient het stuur naar links te draaien en de sleutel in te duwen en ook naar links te draaien. Zie afbeelding (1) hiernaast



Bluetooth



Display:

1. Knipperlicht rechts en links.
2. Groot licht.
3. Signaal Rijstand D = Drive. (vooruit)
4. Signaal Rijstand N = Neutraal.
5. Signaal Rijstand R = Achteruit.
6. Verlichting.
7. Vulgraad van de accu's.
8. Snelheidsmeter.
9. Kilometer / dagteller.

Bluetooth SoundSystem:

1. Aan en uit knop
2. USB ingang

De tekst blue moet in beeld komen om uw telefoon te kunnen koppelen.



1

2

3

Schakelaars.

1. Met deze schakelaar kunt u een keus maken uit de 3 rijstanden:

D = Drive. (vooruit)

N = Neutraal.

R = Achteruit.

2. Omhoog Ruitenwisser aan/uit. Omlaag ruitensproeier aan.

3. Verwarming aan / uit.

Voor koude lucht zet u de schakelaar in de bovenste stand.

Voor warme lucht (kachel) zet u de schakelaar in de onderste stand

Het gebruik van de kachel vraagt veel stroom en beperkt de actieradius van uw Move Vigorous. Daarom adviseren wij u om het gebruik van de kachel tot een minimum te beperken.

Bediening

1. Schakelaar voor grootlicht en dimlicht.
2. Richtingaanwijzer voor zowel links- als rechtsaf. Met de witte knop in het midden schakelt u de knipperlichten uit.

Om de alarmlichten in te schakelen zet u de schakelaar eerst in de linker en daarna in de rechter stand.

3. Schakelaar voor verlichting: (links) dagrijverlichting- (midden) stadslicht – (rechts) dimlicht
4. Claxon.
5. A) Voltmeter aan (dient omhoog te staan.)
B) Voltmeter uit (dient omlaag te staan)
6. Versnelling, 1, 2 en 3



1 2 4



3 5 6



1

2

Parkeerrem.

Om verder rollen van het voertuig te voorkomen kunt u, na het parkeren, gebruik maken van de parkeerrem. Om deze te activeren knijpt u de linker remhendel (zie 1 op foto) gedeeltelijk in. Hierna kunt u de schakelaar (zie 2 op foto) over de hendel schuiven. De remhendel blijft ingedrukt en de parkeerrem is geactiveerd.

Om de parkeerrem te deactiveren knijpt u de linker remhendel nogmaals in en de schakelaar zal loskomen van de remhendel. U kunt weer gebruik maken van uw voertuig.

Om schade aan het voertuig te voorkomen is het belangrijk dat u het contact uitzet voordat u de parkeerrem activeert.

Voltmeter.

Deze zit bevestigd op het stuur. De bediening hiervan vind u op pagina 12 punt 6.





Laden van de accu's

Als u het klepje op de achterzijde van uw Move Vigorous opent, treft u hier het laadpunt aan. Sluit het bijgeleverde laadsnoer aan de ene kant aan met het voertuig en stop de andere zijde in het stopcontact. De lader begint de accu's op te laden en er zal een lampje aan de binnenkant bij het achterrait gaan branden.

Bij een rood brandend lampje: de vulgraad van de accu's is lager dan 25%

Bij een geel brandend lampje : de vulgraad van de accu's is rond de 50%

Bij een groen brandend lampje: de vulgraad van de accu's is 70%

Na 2 uur zal de Vigorous voor 60% volgeladen zijn. Om de accu 100% vol te laden zal de Vigorous nog 4 uur nodig hebben. Hoe voller de accus geladen zij, des te meer tegendruk ze gaan geven. Zodra de lader stopt met zoemen kunt u de laadsnoer afkoppelen.

In noodgevallen kunt u de hoofdstroomschakelaar (blauwe knopje boven het laadpunt) op OFF zetten. Alle stroomvoorziening is dan uitgeschakeld. Vergeet niet om de schakelaar op ON te zetten als u het voertuig weer wilt gebruiken.

Ook als u uw Move Vigorous langere tijd niet gebruikt raden wij u ten strengste aan om de accu's elke twee weken helemaal vol te laden.

***Als de accu's langer dan 2 weken niet opgeladen zijn,
dient u het accu pakket te vervangen***

Rijd de accu's nooit helemaal leeg.

Zodra de Vigorous geen witte vakjes meer toont dient u te gaan laden.

Zodra de Vigorous verzwakt in snelheid en kracht mag u niet verder rijden.

Anders beschadigt u de accu's ook. (Dit geldt niet voor het Lithium Pakket)



Onderhoud en verzorging.

De Vigorous S-Line / InnerCity II heeft een garantie periode van 2 jaar en zelfs 3 jaar frame garantie. Deze garantie is niet meer geldig wanneer u zelf of een niet erkende Move Dealer er aan gaat sleutelen.

De fabrikant schrijft voor dat de Move Vigorous minimaal 1 x per jaar of 1 x per 2500 KM (afhankelijk van wat als eerste van toepassing is) onderhoud nodig heeft. Dit voorgeschreven onderhoud is van belang om uw recht op fabrieksgarantie te behouden.

Onderstaande punten van onderhoud dienen door de berijder zelf te worden uitgevoerd:

Controleer regelmatig de bandenspanning. Minimaal 1x per 3 maanden.

Bandenspanning voor 2,4 bar

Bandenspanning achter 2,6 bar

Controleer regelmatig de verlichting.

Het regelmatig reinigen van de Move Vigorous verlengt het behoud van de lak.

Voor regulier onderhoud en eventuele reparaties verzoeken wij u contact op te nemen met uw plaatselijke dealer.



Disclaimer

Het is volledig de verantwoordelijkheid van de bestuurder om alle toepasselijke voertuig- en verkeerswetten te kennen, te begrijpen en na te leven waar ze ook mogen gaan. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om te voldoen aan alle toepasselijke voorschriften. Niet-geautoriseerde wijzigingen aan deze elektrische scooter kunnen ertoe leiden dat het voertuig onveilig en / of onwettelijk wordt.

Importeur: MOVE BV, De Run 4424, 5503LR
Veldhoven, NL www.move.nl info@move-nl.com
+3140 2407031

Geprogrammeerd onderhoud

Omschrijving beurt: 0 Beurt/ afleveringsbeurt

Datum:

KM- stand: 0 KM

Kenteken:

Opmerkingen: 0 beurt uitgevoerd

Stempel / handtekening dealer:



Dealer: **MOVE BV Veldhoven**

Geprogrammeerd onderhoud

Omschrijving beurt: 500 kilometerbeurt / 1^e jaarbeurt

Datum:

KM- stand:

Kenteken:

Opmerkingen: Geen

Stempel / handtekening dealer:

Dealer:

Geprogrammeerd onderhoud

Omschrijving beurt: 2500 KM

Datum:

KM- stand:

Kenteken:

Opmerkingen: Geen

Stempel / handtekening dealer:

Dealer:

Geprogrammeerd onderhoud

Omschrijving beurt: 5000 KM

Datum:

KM- stand:

Kenteken:

Opmerkingen: Geen

Stempel / handtekening dealer:

Dealer: